

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 咀嚼能力検査用物質（71093001）

咀嚼能力測定用グミゼリー

再使用禁止

【警告】


1.ゼラチンアレルギーの患者には使用しないこと。[アレルギー症状が発症するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

[使用方法]
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状

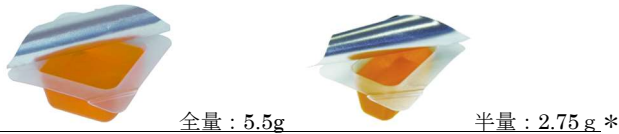

2.型式

咀嚼能力測定用グミゼリー 20 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー 100 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 20 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 100 個入

3.原材料

麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン、水、ソルビトール、クエン酸、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤

4.原理

患者に本品を咀嚼させ、ろ過用メッシュを載せたコップに吐出させる。吐出した本品の形状をスコア表を元に計測し、咀嚼能力を評価する。

【使用目的又は効果】

咀嚼能力の検査に用いる標準物質である。患者が本品を咀嚼し、その後吐出した形状を計測することで、咀嚼能力を検査する。

【使用方法等】

使用方法

○必要用具

- 咀嚼能力測定用グミゼリー（測定の30分前に冷蔵庫から取り出し室温に戻す）
- 歯科用ミラー
- ピンセット
- 紙コップ
- 10cm 角以上のガーゼ

○使用手順

- 舌の上に咀嚼能力測定用グミゼリー（以下、グミとする）を置く
- 30回自由に咀嚼してもらう
- 紙コップにかぶせたガーゼの上にグミを全部吐き出してもらう
- 口腔内に残留がないか確認する
- 問診する ※1 問診内容は以下に記載
- ガーゼの上にすべてのグミのかげらがある状態にする
- ガーゼでグミを包み、流水で軽く唾液を除去する
- 紙カップの上にガーゼを貼り、グミのかげらを均一に広げる
- スコアシートを参照して、スコアを判定する ※2,3 スコアシートは下記を参照*


※1 問診内容

- 噛みにくかったですか？
- 30回噛んで飲みこめると思いましたか？
- 歯や義歯は痛くなかったですか？

※2 咀嚼能力判定用スコアシート

対応型式：咀嚼能力測定用グミゼリー 20 個入

咀嚼能力測定用グミゼリー 100 個入

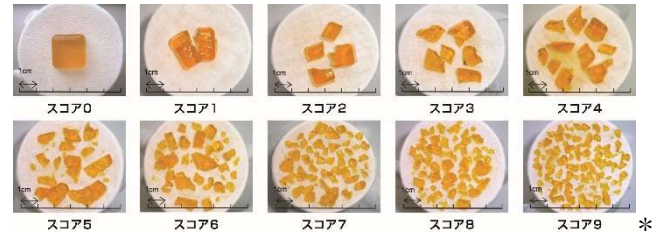

※3 咀嚼能力判定用スコアシート（半量）

対応型式：咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 20 個入

咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 100 個入



<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 包装がすでに破損又は汚損していた場合、使用しないでください。
- 開封後は速やかに使用してください。

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>

- ゼラチンアレルギーのある患者 [アレルギー症状が発症するおそれがある。]
- 幼児、高齢者の患者 [誤飲または窒息のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

静置保管

2.保管条件

直射日光・高温多湿を避け、冷蔵（10℃以下）で保存。

3.有効期間

製造後 24 ヶ月。包装の使用期限を参照。

【取扱い上の注意】

- 本品は単回使用の医療機器です。使用後は汚染防止、感染防止のためにも速やかに廃棄してください。
- 本品を廃棄する場合、自治体の廃棄方法に従って感染防止を留意し廃棄してください。
- 本品は食品ではありません。誤って飲み込まないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

味覚糖株式会社

大阪府大阪市中央区神崎町 4 番 12 号

問合せ先：

味覚糖株式会社お客様相談センター

〒639-1031

奈良県大和郡山市今国府町 137-5

フリーダイヤル 0120-557-108

土・日・祝を除く 9:00~17:00

メール：contact@uha-mikakuto.co.jp